
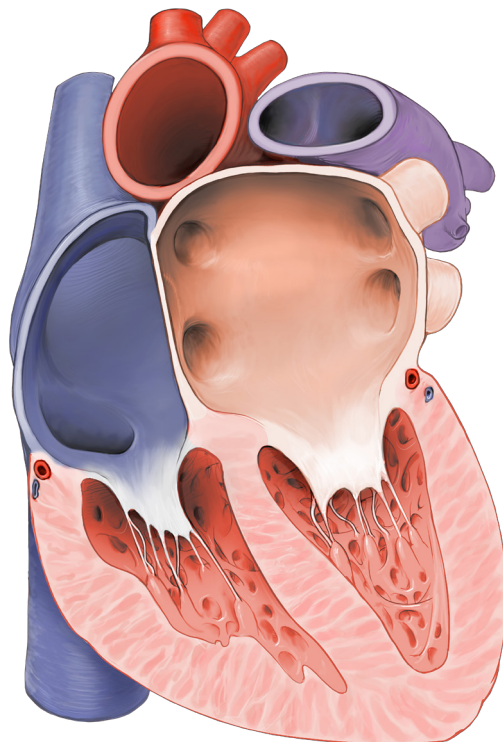


Terapia Hybrid AF™

Comprender el procedimiento híbrido de FA

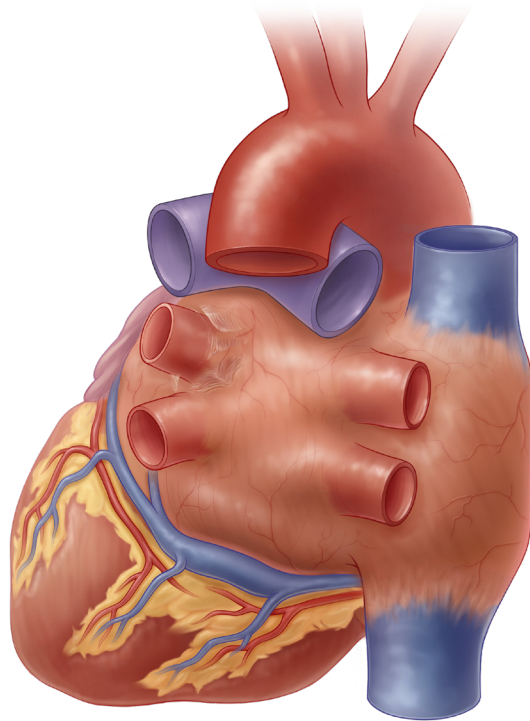

Terapia híbrida de FA

Primera parte: procedimiento de ablación epicárdica

- Pequeño corte en el pecho de 2 a 3 cm (0.79 a 1.18 pulg.) por debajo del esternón.
- Las lesiones superpuestas crean una barrera para detener las señales eléctricas inestables.

Segunda parte: procedimiento de ablación endocárdica

- Acceso a la vena femoral para llegar al corazón a través de la vena.
- Mapeo eléctrico para localizar cualquier señal eléctrica anormal persistente.
- Formar lesiones en las venas pulmonares y en cualquier otra zona que continúan con una actividad eléctrica anormal.

Después del procedimiento: recuperación

- De dos a tres días en el hospital.
- Medicamentos para prevenir la inflamación.
- Reanudar la toma de los medicamentos para el corazón según las indicaciones del médico.
- Consultar cuándo puede volver a sus actividades diarias.

La terapia híbrida de FA es para el tratamiento de la fibrilación auricular persistente de larga duración.

Información sobre el riesgo: este procedimiento no se recomienda en pacientes con esófago de Barrett, presencia de trombo (coágulo) auricular izquierdo, una infección sistémica o una infección activa en el lugar de la operación en el momento de la operación (es decir, endocarditis activa).

Las posibles complicaciones del procedimiento incluyen, entre otras, las siguientes: derrame del pericardio, inflamación del pericardio, infección, obstrucción cardíaca, estrechamiento de la vena pulmonar, lesión vascular, perforación de tejidos, hemorragia excesiva, lesión del nervio diafragmático, rotura de la aurícula izquierda, fistula esofágica, ataque al corazón, nuevas arritmias, complicación tromboembólica, derrame/microderrame transitorio (AIT)/complicación neurológica, bloqueo cardíaco completo que requiere la colocación de un marcapasos permanente, quemadura grave de la piel, acumulación de líquido alrededor de los pulmones o la muerte.

Esta información no es exhaustiva. Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener el etiquetado del producto aprobado por la FDA o visite www.AtriCure.com.

Con receta médica únicamente.